

AEDトレーナー (Medtronic) 利用上の注意

心肺蘇生法の手技や流れを理解した
上で、使用してください。



① 本体後部にリモコンが収納されています。



② 先に右側面のメインスイッチ
をスライドさせ電源を入れます。



③ 次に正面のON/OFFスイッチを押し
蓋を開けると、音声ガイダンス
が始まります。(必ず②→③の順番)
ガイダンスに従ってシミュレーションを
進めていきます。



④ 電気ショックのシミュレーション
に進むには電極パッドのマーク
(F2ボタン) をクリックしてください



⑤ 受信部は赤丸の部分なので
このあたりにリモコンを向けて
ボタンを押してください。

※ メインスイッチをスライドさせ
OFFにすると、音声ガイダンス
が止まります。

破損・汚損を発見した場合 あるいは破損・汚損した場合は、センターのスタッフまでお知らせください。