



AEDトレーナー (日本光電) 利用上の注意

心肺蘇生法の手技や流れを理解した上で、使用してください。

※ パッド等を完全に収納して蓋を閉め、ツメでロックが入るまで、音声は鳴り止みません。



① 本体背面にリモコンが収納されています。



② 蓋をあけてリモコンを取り出します。



③ 正面の蓋のツメがスイッチになっているのでスライドして蓋をあけると、音声ガイダンスが始まります。



④ 電気ショックのシミュレーションに進むには右上のイナズマのマーク(2番のボタン)をクリックしてください



⑤ 受信部は背の部分にあるので、反応が悪い時はこのあたりにリモコンを向けてください。

破損・汚損を発見した場合 あるいは破損・汚損した場合は、センターのスタッフまでお知らせください。