


レサシアン withQCPR SimPadの 使い方

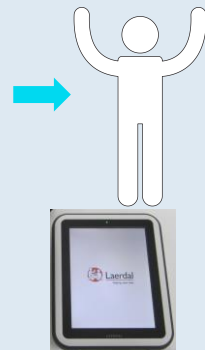

SimPadを使うことで、胸骨圧迫のテンポや深さを判定することができます。指導者が同席しない練習の際などに役立ちます。

- ① はじめにマネキンの右脇腹にある電源を入れます。マネキン本体がWiFiルーターになります。
- ② 次にSimPadの電源を入れて、メニューを選択します。
- ③ マネキンが見つからない時は設定画面から探してください。



※ 複数のマネキンの電源を一遍に入れると、SimPadが同時に複数のWiFiを拾うため、どのマネキンか特定しづらくなります。1台ずつ設定しながら起動することをお勧めします。






レサシアン withQCPR スキルガイド の使い方

SimPadより機能は限られていますが、深さの判定などが
簡便に利用できます。研修等にお役立てください。

- ① はじめにマネキンの右脇腹にある電源を入れます。
マネキン本体のWiFiモードはOFFでよいです。

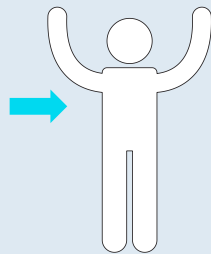

- ② 次にスキルガイドを取り出し…



マネキンの右肩に接続するだけ☆
電源は本体から供給されます

